

Návod na akumulátorový odrohovač BUDDEX

Obj. číslo: 1790



Upozornenie: Pre budúce použitie uschovajte!

Dodržujte všeobecné bezpečnostné pokyny!

Dôležité!

Prečítajte si dôkladne návod na použitie! Nabíjajte batériu najmenej 16 hodín pred prvým použitím. Zafixujte dobre tel'a pred začiatkom práce s odrohovačom. Dodržujte pravidlá v danej krajinu pre zaobchádzanie so zvieratami. Pokiaľ ste odrohovač dlho nepoužívali, potom je nutné odrohovač po pauze vyskúšať na kúsku dreva. Zatláčajte odrohovač silou proti púčiku rohu a zhruba po 5 sekundách otočte odrohovačom tam a späť niekoľkokrát. Počas odrohovania svieti červená LED dióda po dobu 6,5 sekúnd. Ak stratíte kontakt so zvierat'om (napr. kvôli pohybu), potom musíte počkať, kým dióda zhasne, inak nebude odrohovač fungovať. Odrohovač sa smie použiť iba na odrohovanie tel'aťa a to medzi 8. a 14. dňom jeho veku

1. Základné informácie

Tento odrohovač je riadený elektronickým mikropocesorom. Pre optimálne výsledky a dlhú životnosť prístroja je veľmi dôležité dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Ukladajte a nabíjajte odrohovač na suchom a chladnom mieste.

Upozornenie: Neukladajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov.

Skladujte a nabíjajte iba na teple odolných a nehorľavých materiáloch.

- Nevystavujte odrohovač vlhku a nárazom.

- Odrohovač môže byť používaný iba zaškolenými osobami.

- Odrohovač vždy uchovávajte mimo dosahu detí!

- Používajte iba podľa návodu. Nesprávne alebo neprimerané použitie môže viesť k poraneniu či požiaru.

- Netlačte odrohovač proti kovovým predmetom.

2. Nabíjanie

Prvé nabíjanie

Pred prvým použitím zasuňte kolík nabíjačky do odrohovača a nabíjačku do zásuvky. Zelená kontrolka na prístroji začne blikať. Môže sa stať, že pri prvom nabíjaní začne zelená dióda blikať až po 1 hodine. Zhruba po 16 hodinách nabíjania prestane dióda blikať a svieti permanentne, čo značí plné nabitie batérie a odrohovač je pripravený na použitie.

Dôležité: Pred prvým použitím počkajte, než zasvieti zelená dióda!

Následné nabíjanie

Batérie v odrohovači je vhodné pred ďalším dobitím čo najviac vybiť, aby nedochádzalo ku zbytočným stratám kapacity batérie.

Upozornenie: Dajte pozor na uskladnenie prístroja počas nabíjania (viď. vyššie).

Nabíjanie pomocou 12V adaptéra

Pokiaľ nemáte v dosahu elektrickú sieť, je možné odrohovač nabiť cez autobatériu. Aj v tomto prípade je dôležité aby odrohovač pri nabíjaní nebol v blízkosti horľavých látok či predmetov. Adaptér sa zahrieva, keď sa batéria nabíja. Tento typ napájania odporúčame iba v nutných prípadoch, keď nie je k dispozícii elektrická sieť a pokiaľ nepotrebujete dobíjať odrohovač dlhšiu dobu (pre plné nabitie).

3. Použitie

A. Základné informácie

Odrohovač je vybavený časovým spínačom / alarmom, ktorý vydáva tón po 6,5 sekundách odrohovanie, a vypne žhavenie hrotu aj cez tlak odrohovača na púčik rohu. Začiatok odrohovania signalizuje rozsvietenie červenej diódy, koniec potom jej zhasnutie a spustenie zvukového alarmu. Zvuk neprestane, kým neprestanete tlačiť odrohovačom na puk rohu. Odrohovač nie je možné používať počas nabíjania. Na najlepšie použitie batérií sú nevyhnutné nasledujúce pauzy.

- Medzi 2 odrohovaniami: najmenej 10 sekúnd
- Najviac po 6 odrohovaniach (3 zvieratá), by mala byť pauza min. 5 minút pre schladenie prístroje.

Dôležité: prístroj je vybavený poistkou proti prehriatiu, jej aktivácia je signalizovaná rýchlym blikaním červenej diódy. Počkajte, po chvíli sa poistka resetuje

Pokiaľ bude batéria dostačovať už iba pre 2 odrohovanie, odrohovač začne vydávať tón v intervaloch. Keď bude batéria úplne vybitá, odrohovač sa vypne. Pokiaľ bude zapnutý a červená dióda zhasne, odrohovač bude vydávať súvislý tón. Po 20 minútovej pauze je stále možnosť ďalších 1-2 odrohovania. Potom musí byť odrohovač okamžite dobýť.

B. Odrohovanie pri hmatateľnom rohu

To je najlepší čas na odrohovanie. V tomto momente dosiahnete najlepšie výsledky a zároveň najmenšieho stresu pre zviera! Žiadne ďalšie prípravy nie sú potrebné. Uistite sa, že počas odrohovanie hlava i celé zviera je dobre fixované tak, aby nedošlo k poraneniu zvieraťa či obsluhy.

Odstráňte ochranné viečko a dajte si pútko okolo zápästia. Priložte špičku odrohovača na púčik rohu a silne pritlačte. Vo chvíli keď je keramický krúžok zahriať, rozsvieti sa červená dióda. Hneď ako uvidíte dym (cca po 5s.), 2-3 krát otočte zápästím odrohovač tak, aby ste „prerezali“ chlpy, kožu a dostali sa na roh a ku kosti.


Po 6,5 sekundách budete počuť tón a prístroj sa vypne. Teraz zložte odrohovač z hlavy zvieraťa a rovnako postupujte pri druhom rohu. Ak budete odrohovať včas, potom 1 pokus postačí na zastavenie ďalšieho rastu rohu.

To je najlepší čas na odrohovanie. V tomto momente dosiahnete najlepšie výsledky a zároveň najmenšieho stresu pre zviera! Žiadne ďalšie prípravy nie sú potrebné. Uistite sa, že počas

odrohovanie hlava i celé zviera je dobre

C. Odrohovanie pri viditeľnom rohu

Postupujte rovnako ako pri bode B. Až sa urobí kruhový rez, je nutné odňať stredovú časť rohového tkaniva uprostred krúžku (Obr. B). Hneď ako začne rásť kosť pod rohom, môže dôjsť k nechcenému hojivému procesu zvnútra. Preto je nutné všetko rohové tkanivo odňať zo stredu krúžku, ktorý vznikne odrohovaním. Ak sa nepodarí vytvoriť kruhový rez než sa odrohovač vypne, celý proces môže byť zopakovaný. Uvoľnením odrohovača pred automatickým vypnutím, môže byť dosiahnutá kratšia doba čakania pre kompletne odstránenie rohoviny, bez stresu zvieraťa.

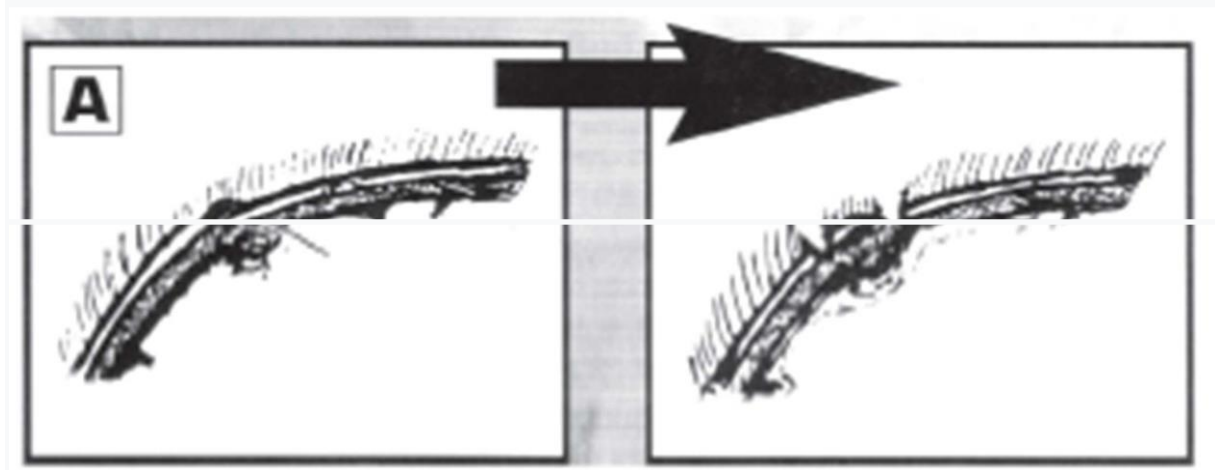

Nahmatateľný pupeň rohu
v 1-3 týždni veku teľaťa

Iba kruhové odrohovanie



Viditeľný pupen rohu 2 -6 týždni veku teľaťa

Rohohové tkanivo je nutné odstrániť

Likvidácia:

Po uplynutí životnosti, alebo v okamihu, keď ďalšie opravy sú neekonomické, likvidujú sa jeho časti po celkovej demontáži s ohľadom na dodržanie predpisov na ochranu životného prostredia.

Kovové časti sa roztriedia podľa druhov kovov a ponúknu sa na odpredaj organizácii zaoberajúcej sa so zberom druhotných surovín.

Časti z umelých hmôt a ostatných materiálov, ktoré nepodliehajú prirodzenému rozkladu sa roztriedia a odovzdajú organizácii zaoberajúcu sa zberom týchto materiálov.



OVISFARMA SK, s.r.o.

Kpt. Nálepku 566

017 01 Považská Bystrica

Tel. 0948 230 609

Email: ovisfarma@ovisfarma.sk