

Návod na použitie páky na telenie s pružným oblúkom 57 cm, dĺžka 180 cm

obj. č: 3888



Pracovný postup pri pôrode:

Za členkovými kĺbami vytvoríte slučku a utiahnete. Pôrodné povrázky následne zaveste na háčiky (1) umiestnené na posuvnej časti. Ak potrebujete pohyblivú časť presunúť bližšie k nosnej ploche páky (prepravná poloha), najprv stlačte poistnú páčku (2) na zadnej strane a veľkú páku (3). Zatlačte na uzamykáciu páky, kým sa nezablokuje proti spätnému pohybu. Potom môžete pohyblivú časť ľubovoľne posúvať. Pre vloženie pohyblivej časti späť do pracovného režimu znova stlačte poistnú páčku a páku uvoľníte od poistnej páčky. Teraz môžete pomaly ťahať lýtko (pohybom páky dopredu-dozadu). Buďte mimoriadne opatrní, aby ste sa vyhli zraneniu rodiacej kravy alebo teľaťa a počas pôrodu sa uistite, že všetko ide dobre.

UPOZORNENIE:

- Dodržujte bezpečnostné pokyny!
 - Porodnú páku udržiajte v čistom stave.
 - Pred použitím páky dobre očistite pohlavné orgány.
 - Pred použitím sa uistite, či má teľa správnu polohu.
 - S pôrodnou pákou smie pracovať len poverená osoba.
 - Pôrodný asistent musí byť ohľaduplný a nebude pôrodnou pákou zvieratú spôsobovať nadmernú bolesť.
 - Pôrodná páka je určená len pri pôrode kravy.
 - Majte na pamäti, že veľká sila môže viesť k poraneniu zvieratá.
- Pri komplikáciách pri pôrode zavolajte veterinára.

Postup pri skladaní:

Najprv sa musí flexibilná opierka HK nasunúť na hornú časť tyče.

Pohyblivú časť nasuňte zo spodnej strany na tyč v prepravnej polohe a potom ju opäť dajte

do pracovnej polohy. Pri nasadzovaní dajte pozor, aby nebola nasadená opačne (háčiky musia smerovať od opornej časti. Potom spojte obe strany tyče. Opornú časť natočte na tyči tak, aby predvŕtané diery boli proti sebe. Potom opornú časť k tyči primontujte.



OVISFARMA SK, s.r.o.
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
Tel. 0948 230 609